

チェックミーADVブラウザ（V1.2.8）操作方法

2021年7月

■初回起動時

1. チェックミーADVブラウザを起動します。

デスクトップのアイコンをダブルクリックしてください。



2. 初めて起動した際には保存先の設定画面が開きます。



・データを保存するディレクトリを選択

チェックミーから取り込んだデータを保存する場所を指定します。


変更する場合は「ブラウザ」ボタンから場所を指定してください。

設定が終了したら「確定」ボタンをクリックしてください。

■データ取り込み方法


1. チェックミーADV ブラウザーを起動します。

デスクトップのアイコンをダブルクリックしてください。

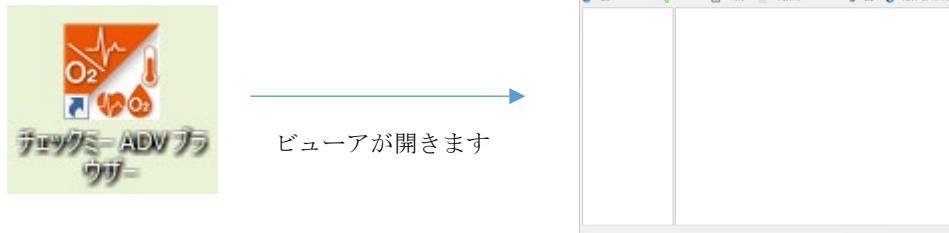


2. チェックミー本体で、「パソコン接続」を選択します。

「設定」から「パソコン接続」を選択してください。

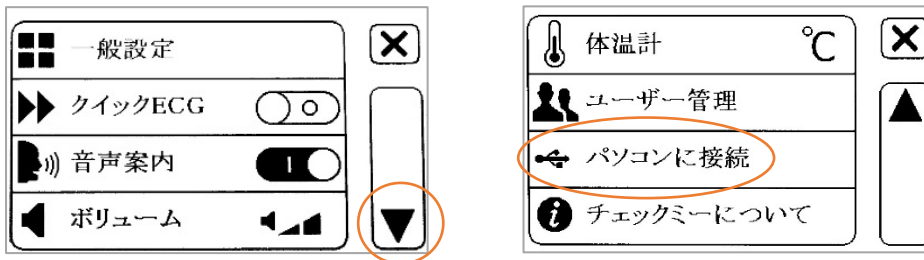


3. チェックミー本体とパソコンを充電用 USB ケーブルで接続します。



4. デバイスリスト画面が開きますので、下部のダウンロードをクリックします。

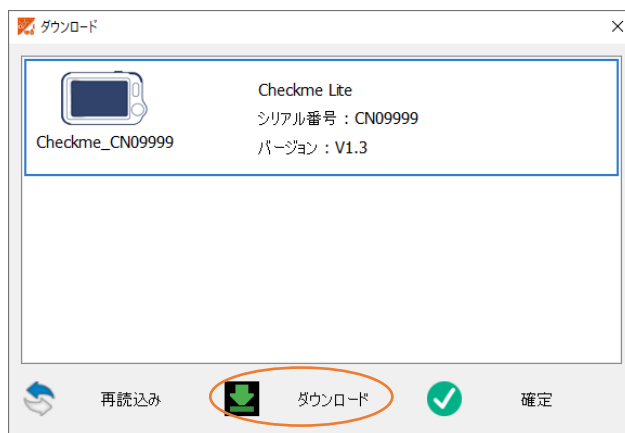

5. 「ダウンロード完了」と表示されたら、
下部の「確定」を選択します。

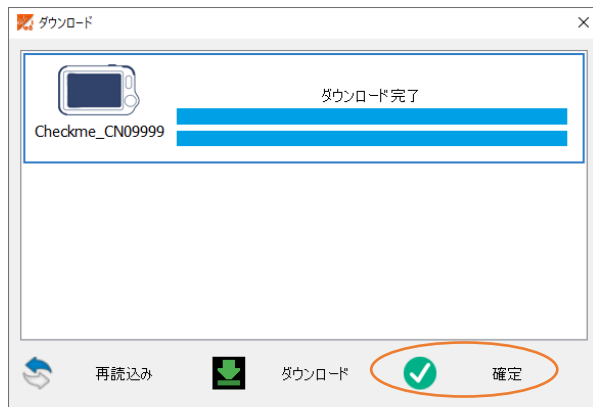


6. データの取り込みが完了しました。

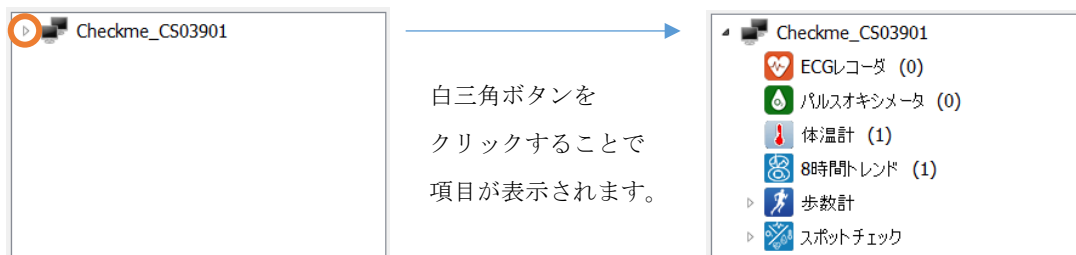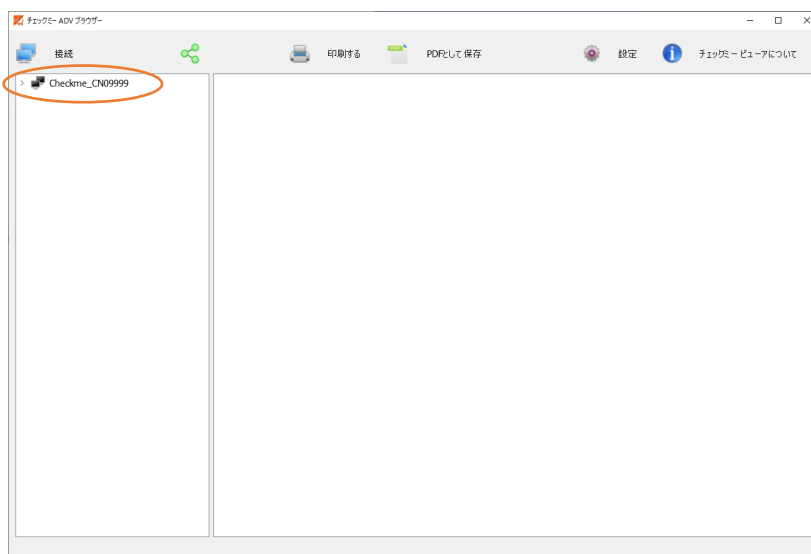


■ データ確認方法

例>> ECG レコーダ

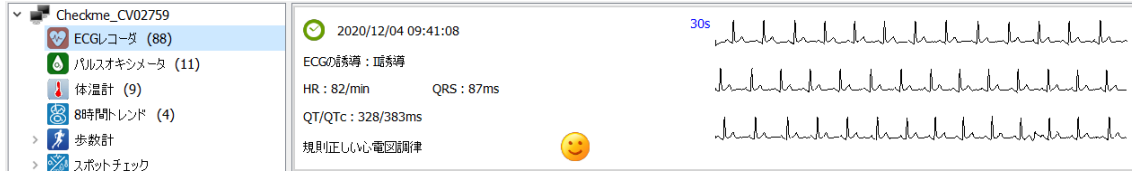


データ上にマウスポインタを合わせると、拡大ボタンと削除ボタンが表示されます。

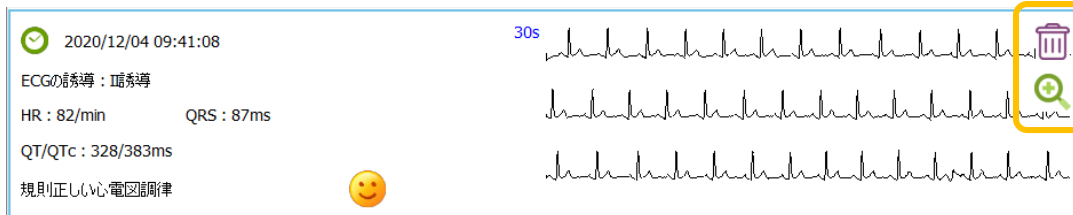

- 拡大ボタンをクリックするとレポートを表示します。
(データ上をダブルクリックしてもレポートが開きます。)

※レポートは「ECG レコーダ」、「スポットチェック」、「8時間トレンド」のデータで表示されます。

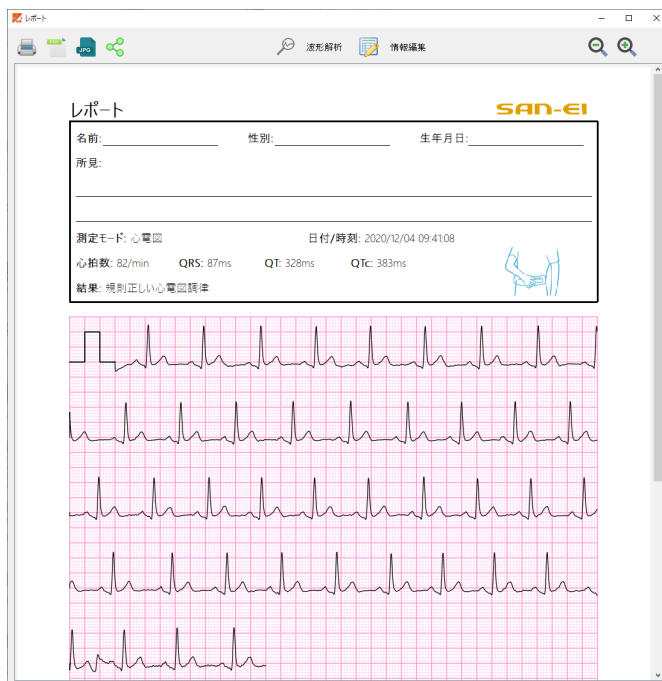

- 削除ボタンをクリックし、表示された確認画面で「はい」を選択すると、ビューア上からデータが削除されます。

・レポート 各アイコンの説明



レポートの印刷を行います。

※ご注意 お使いのプリンターにより、正常に印刷できない場合がございます。
その場合、別のプリンターをご使用いただくか、
PDF ファイルまたは JPEG 画像に保存したデータから印刷を行ってください。



レポートの PDF ファイルが保存できます。



レポートの JPEG 画像が保存できます。




クラウドヘデータをアップロードします。

※クラウドご利用には利用登録が必要です。

詳しくはクラウド紹介ページ (<https://www.checkme.jp/function/cloud>) をご覧ください。



波形を拡大し、ルーラーの表示を行うことができます。

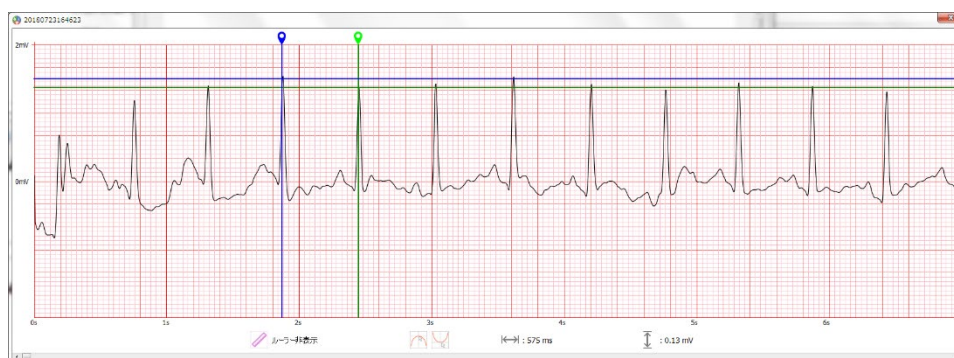



レポートへ記述を追加できます。

情報編集 ×

名前:

性別: 男性 ▼

生年月日: 2000/01/01 ▲▼


所見:

確定
キャンセル



画面表示を拡大・縮小します。

・ 8時間トレンド (SpO2) レポート

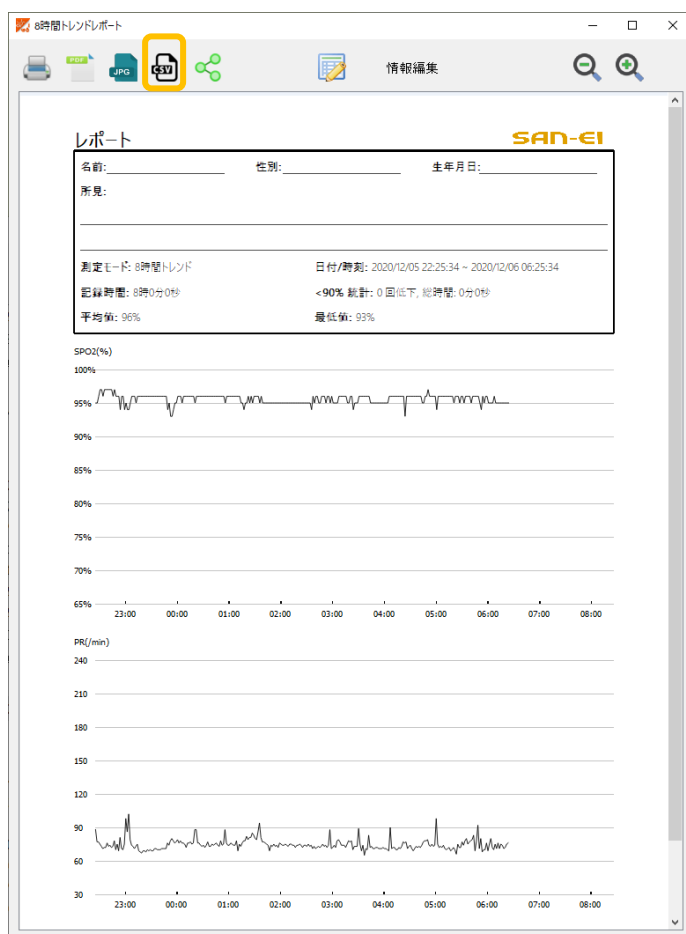


CSV ファイルを出力します。

2秒毎の SpO2 値と脈拍を CSV ファイル形式で出力します。

※正常に測定されなかった場合、数値は"255"と表記されます。

- 一覧画面から複数のデータを選択して「印刷」や「PDF ファイル保存」ができます。
※ 「ECG レコーダ」、「スポットチェック」、「8 時間トレンド」のデータが対象です。

- ・ キーボードの「Ctrl」を押しながら、マウスの左クリックをすることで複数のデータを選択することができます。

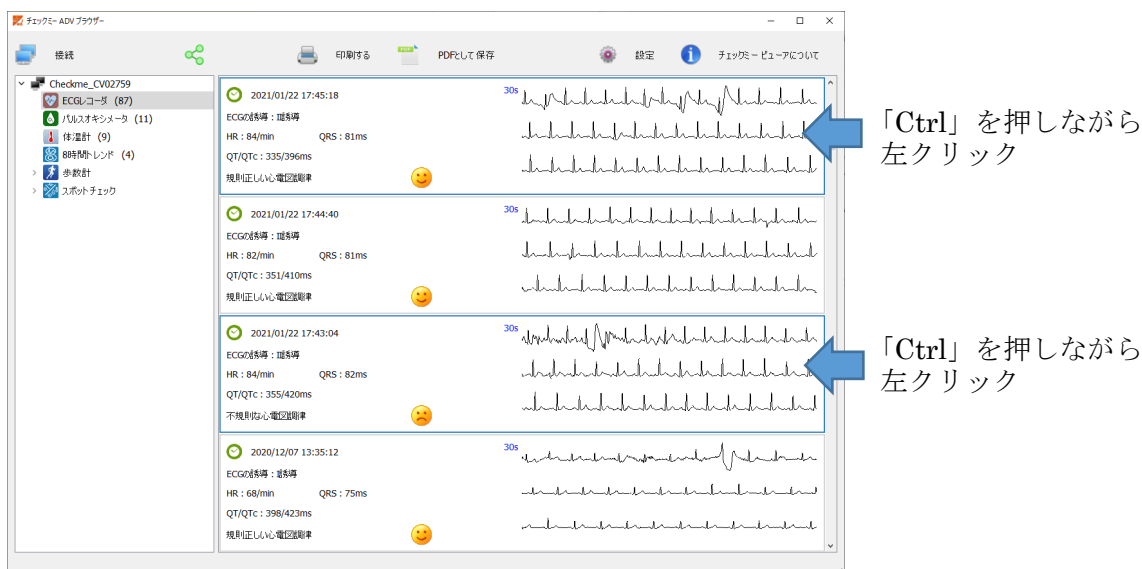

- ・ 複数データを選択した状態で「印刷する」ボタンを押すと選択中のデータのレポートが印刷されます。
- ・ 複数データを選択した状態で「PDF として保存」ボタンを押すと選択中のデータのレポートをひとつの PDF ファイルとして保存します。

